



II. Aktivácia očnej masky

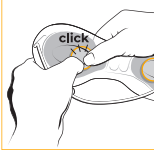

Postupne aktivujte obe strany vložky (A) pomocou mechanizmu kliknutia: za týmto účelom

niekoľkokrát stlačte kovový kotúčik v oboch smeroch, kým sa obsah vložky nezmliečni, nestuhne, a súčasne sa nezohreje (podobne ako ohrievač rúk). Následným masírovaním sa

zohriata vložka zvláčni a lepšie sa prispôsobí očnému okoliu.

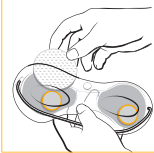


Navlhčite dva vatové tampóny vlažnou vodou. Umiestnite ich medzi aktivovanú vložku (A) a kryt očnej masky (C) tak, aby boli za oválnymi výrezmi.

III. Nasadenie očnej masky



Pri nasadzovaní masky na oči sa uistite, že máte navlhčené vatové tampóny na zatvorených očiach. Natiahnite si elastickú pásku cez hlavu a pohodlne si ju nastavte. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nechajte teplo pôsobiť 5 – 10 minút.

IV. Hygiena očných viečok po použití očnej masky

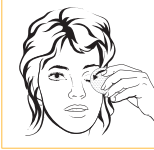


Po použití očnej masky je dôležitým krokom očistenie očných viečok. Dajte si dolu očnú masku a vyberte vatové tampóny. Pomocou práve odstránených vatových tampónov masírujte a čistite očné viečka a okraje očných viečok nasledovne:

Horné viečko: Jemne utrite horné viečko zhora nadol 5 až 10-krát. Spodné viečko: Jemne utrite spodné viečko zdola nahor 5 až 10-krát. Nakoniec znovu očistite okraje očných viečok novými navlhčenými vatovými tampónmi. Po použití vatové tampóny zlikvidujte.

4. OPĀTOVNÉ POUŽITIE A STAROSTLIVOSŤ

I. Príprava na opätovné použitie samoohrievacej vložky

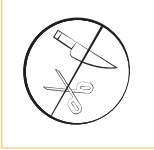

Pri manipulácii s vložkou (A) **nepoužívajte ostré predmety**.

Vyberte vložku z krytu očnej masky (C) a varte ju vo vode približne 10 minút. Vložka by mala byť pokrytá dostatočným množstvom vody. Vložka je pripravená na opätovné použitie, ak sa jej obsah opäť úplne skvapalnil.

Po vybratí vložky z vriacej vody ju nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť na izbovú teplotu, aby ste predišli podráždeniu v dôsledku tepla.



Vložku vysušte a medzi jednotlivými použitiami ju uložte do prehľadného puzdra (D).

II. Čistenie krytu očnej masky

Keďže sa kryt očnej masky (C) nesmie vyvárať, v prípade potreby postačí čistenie vlhkou handričkou a mydlovou vodou. Potom všetky časti osušte čistou utierkou.

5. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Nepoužívajte masku na oči, ak máte známu precitlivosť na niektorú zo zložiek (pozri bod 11.).
- Maska na oči je vhodná len na vonkajšie použitie na neporušenú pokožku.
- Ak je vám teplo na pokožke nepríjemné, prestaňte masku používať.
- U detí a starších ľudí používajte masku na oči len s mimoriadnou opatrnosťou, aby ste sa vyhlí podráždeniu v dôsledku tepla.
- Ak by sa obsah vložky (A) neočakávane dostal do kontaktu s pokožkou, očami alebo oblasťou úst, niekoľko minút ich oplachujte pod tečúcou vodou. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekára.
- Z hygienických dôvodov by sa maska na oči nemala požičiavať iným osobám.

6. FREKVENCIA A TRVANIE LIEČBY

V prípade blefaritídy alebo dysfunkcie meibomových žliaz sa odporúča používať očnú masku dvakrát denne (ráno a večer). Neexistuje žiadne obmedzenie týkajúce sa dĺžky liečby. Pri dlhšie trvajúcich príznakoch sa vždy poraďte s očným lekárom. Ak chcete liečiť jačmenné zmo alebo vľčie zrna, obráťte sa na svojho očného lekára.

7. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov prestaňte masku používať a poraďte sa so svojím lekárom a/alebo lekárnikom. Akýkoľvek závažný vedľajší účinok nahláste výrobcovi a zodpovednému dozornému orgánu.

8. SKLADOVANIE

Očnú masku uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Masku na oči skladujte mimo dosahu slnečného žiarenia a pri teplote od 8 do 25 °C.

9. TRVANLIVOSŤ

Maska na oči by sa nemala používať po dátume expirácie alebo po 90-násobnom použití, pretože nie je možné zaručiť dosiahnutie správnej teploty po aktivácii.

10. LIKVIDÁCIA

Maska na oči sa bežne nerecykluje. Túto zdravotnícku pomôcku zlikvidujte ju spolu s domovým odpadom v súlade s predpismi štátnej legislatívy. Toto opatrenie pomôže chrániť životné prostredie.

11. ĎALŠIE INFORMÁCIE

V závislosti od veľkosti balenia je súčasťou balenia jedna alebo dve očné masky.

Každú masku na oči možno použiť až 90-krát.

Maska na oči sa skladá z:

- Samoohrievacej vložky (A) s dvoma oddelenými priehradkami. Každá priehradka je naplnená roztokom octanu sodného a obsahuje kovový kotúčik s plastovým okrajom (B) potrebný na aktiváciu masky.
- Krytu očnej masky (C), do ktorého sa vkladá samoohrievacia vložka. Kryt očnej masky je vybavený nastaviteľným elastickým prúžkom, plastovým zapínaním na patentku a výrezmi na umiestnenie vatových tampónov.

Zložky očnej masky neobsahujú:

- Ftaláty,
- Silikón.

Žiadna zo súčastí, ktoré prichádzajú do kontaktu s pokožkou, neobsahuje latex.

Dátum poskytnutia informácií:

2024-08

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, DE-66129 Saarbrücken, Nemecko

URSAPHARM spol. s r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, Česká republika
Tel.: +420 295 560 468,
e-mail: info@ursapharm.cz, www.ursapharm.sk

Vysvětlivky k symbolům

Vysvetlenie symbolov

Symbol:	Vysvětlivka / Vysvetlenie
	Výrobce / Výrobca
	Distributor / Distribútor
	Zdravotnický prostředek / Zdravotnícka pomôčka
	Jedinečný identifikátor prostředku Unikátny identifikátor pomôcky
	Označení CE / Označenie CE
	Číslo šarže
	Datum použitelnosti [RRRR-MM] Použitelnost končí poslední den uvedeného měsíce. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. Datum spotřeby [RRRR-MM] Datum expirácie sa vzťahuje na posledný deň uvedeného mesiaca Nepoužívajte po dátume expirácie.
	Přečtěte si návod k použití / Prečítajte si návod na použitie
	Uchovávejte při teplotě od 8 °C do 25 °C Skladujte pri teplote 8 °C – 25 °C
	Jeden pacient, vícenásobné použití Jeden pacient, viacnásobné použitie
	Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního světla Skladujte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia