

POSIFORLID®

Čistící ubrousky na hygienu očních víček

K dennímu čištění a péči o oční víčka

Používat pouze na zavřené oči

Bez konzervačních látek a parfémů

Co jsou POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček a k čemu se používají?

POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček jsou zvlhčené, sterilní, jednorázové ubrousky vhodné k dennímu čištění a péči o citlivá oční víčka.

POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček obsahují hyaluronát sodný, přesličku a světlík lékařský (Euphrasia) a pomáhají jemně čistit a ošetřovat citlivou pokožku očních víček. Současně jemně odstraňují usazeniny (jako jsou jednotlivé krustičky, prach či pyl) z očních víček a z řas.

POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček jsou proto vhodné i na podporu péče o podrážděná oční víčka.

Co potřebujete vědět dříve než použijete POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček?

POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček jsou určeny pouze k zevnímu použití a mají se používat pouze na zavřené oči.

POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček nepoužívejte při přecitlivosti na kteroukoliv ze složek (viz informace v části „Ingredients“ na obalu).

Během nošení kontaktních čoček nepoužívejte POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček. I pokud je použijete na zavřené oči může tekutina z nich přijít za určitých okolností do kontaktu s kontaktními čočkami. Protože není k dispozici dostatek údajů o jejich kompatibilitě s materiály kontaktních čoček, je doporučeno nepoužívat je současně.

Jak se POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček používají?

1. Pokud používáte oční kosmetiku, před použitím ubrousků POSIFORLID® odstraňte make-up.
2. Před použitím ubrousků POSIFORLID® si dobře umyjte ruce.
3. Vyjměte ubrousek z jeho obalu.
4. Zavřete oko a jemným tahem ve směru z vnějšíku dovnitř jej očistěte ubrouskem.
5. Po použití ubrousek vyhoďte do odpadu (nesplachujte jej do toalety).
6. Novým ubrouskem pak očistěte druhé oko stejným způsobem.



Obecně se doporučuje provádět hygienu očních víček ráno a večer. Nicméně, ubrousky POSIFORLID® mohou být použity vícekrát za den. V případě závažnějších potíží z přecitlivělosti, jako jsou krusty, zčervenání nebo pálení očních víček, kontaktujte očního lékaře.

POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček se mohou používat po neomezenou dobu.

Nepoužívejte POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček, pokud je jejich obal poškozený.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

K aplikaci na kůži. Neaplikujte přímo do očí.

Jaké nežádoucí účinky se mohou vyskytnout při používání produktu POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček?

Při používání produktu POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček se může objevit pálení očních víček či jejich zčervenání nebo svědění. To může být důsledkem intolerance nebo přecitlivělosti na některou ze složek. V takovém případě byste měli přestat používat POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček. Pokud příznaky budou přetrvávat, poraďte se s očním lékařem.

Datum poslední revize textu:

Prosinec 2025

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Německo
Telefon: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88
E-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Distributor v České republice:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10, Česká republika
Tel: +420 295 560 468
e-mail: info@ursapharm.cz
www.ursapharm.cz
www.posiforlid.cz

Praktické tipy na hygienu očních víček:

Vedle použití produktu POSIFORLID® čistící ubrousky na hygienu očních víček by mohlo být užitečné také použití samozahřívací oční masky POSIFORLID®.

POSIFORLID®

Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok

Kozmetika na denné čistenie a starostlivosť o očné viečka

Použiť iba na zatvorené oči

Bez konzervačných látok a parfumov

Čo sú POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok a na čo sa používajú?

POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok sú navlhčené, sterilné jednorazové obrúsky, vhodné na každodenné čistenie a starostlivosť o citlivé očné viečka.

POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok obsahujú hyaluronát sodný, Očianku Rostkovovu (*Euphrasia rostkoviana*) a prasičku a pomáhajú jemne čistiť a ošetrovať citlivú pokožku očných viečok. Zároveň jemne odstraňujú usadeniny (napríklad izolované chasty, prach, peľ) z očných viečok alebo spomedzi mihalníc.

POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok sú preto vhodné aj na starostlivosť o podráždené viečka.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok?

POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok sú určené na vonkajšie použitie a mali by sa používať iba na zatvorené oko.

Nepoužívajte POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok, ak ste precitlivivý (alergický) na niektorú zo zložiek (viď informácie v časti „Ingredients“ na obale).

Počas nosenia kontaktných šošoviek by sa POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok nemali používať. Aj v prípade použitia na zatvorené oko, tekutina z navlhčených obrúskov POSIFORLID® môže za určitých okolností prísť do kontaktu s kontaktnými šošovkami. Keďže nie sú k dispozícii dostatočné údaje o kompatibilitě s materiálmi kontaktných šošoviek, neodporúčame ich súčasné použitie.

Ako používať POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok?

1. Ak používate očnú kozmetiku, pred použitím POSIFORLID® Čistiacich obrúskov na hygienu očných viečok odstráňte make-up.
2. Pred použitím hygienických obrúskov na očné viečka si umyte ruky.
3. Hygienický obrúsok na očné viečka vyberte z obalu.
4. Zavrite oko a očné viečko jemne očistite hygienickým obrúskom na očné viečka smerom zvonka dovnútra.
5. Po použití hygienický obrúsok na očné viečka zlikvidujte (nesplachujte ho do toalety).
6. Opakujte postup na druhom oku s novým hygienickým obrúskom na očné viečka.



Všeobecne sa odporúča vykonávať pravidelnú hygienu očných viečok ráno a večer. Napriek tomu sa POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok môžu používať aj niekoľkokrát denne. V prípade závažnej reakcie z precitlivivosti, ako sú chasty, začervenanie alebo pálenie očných viečok, kontaktujte očného lekára.

Doba používania POSIFORLID® Čistiacich obrúskov na hygienu očných viečok nie je obmedzená.

Nepoužívajte POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok v prípade poškodenia jednorazového obalu.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Pre aplikáciu na pokožku. Neaplikujte priamo na oči.

Aké vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť pri použití POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok?

Pri používaní POSIFORLID® Čistiacich obrúskov na hygienu očných viečok sa môže vyskytnúť pálenie, začervenanie alebo svrbenie oka alebo očných viečok. To naznačuje možnú intoleranciu alebo precitlivosť na niektorú zo zložiek. V takomto prípade by ste mali prestať používať POSIFORLID® Čistiace obrúsky na hygienu očných viečok. Ak príznaky pretrvávajú, poraďte sa s očným lekárom.

Informácie platné od:

December 2025

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Nemecko
Telefón: +49 6805/9292-0, Fax : +49 6805/9292-88
E-mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

Distribútor na Slovensku:

URSAPHARM spol. s r.o.
Kubánské náměstí 1391/11
100 00 Praha 10, Česká republika
Tel: +420 295 560 468
e-mail: info@ursapharm.sk
www.ursapharm.sk
www.posiforlid.sk

Praktické tipy na hygienu očných viečok:

Okrem používania POSIFORLID® Čistiacich obrúskov na hygienu očných viečok by mohlo byť užitočné dodatočné použitie POSIFORLID® samovyhrievacej očnej masky.