



Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, denn sie hilft Ihnen, hysan® Hyaluronspray richtig anzuwenden.

hysan® Hyaluronspray

Natriumhyaluronat 0,04 %

Zur langanhaltenden Befeuchtung und verbesserten Reinigung der Nasenschleimhaut.
Isotonische, sterile Lösung ohne Konservierungsmittel zum Einsprühen in die Nase.

PRODUKTBESCHREIBUNG

hysan® Hyaluronspray ist eine sterile Lösung zur Anwendung in der Nase.

ZUSAMMENSETZUNG

1 ml hysan® Hyaluronspray enthält 0,4 mg Natriumhyaluronat, Natriumdihydrogenphosphat x 2 H₂O, Natriummonohydrogenphosphat x 12 H₂O, Natriumchlorid und Wasser für Injektionszwecke.
Eine Flasche mit 10 ml Lösung entspricht ca. 70 Sprühstößen.
Aus technischen Gründen bleibt immer eine kleine Menge der Lösung in der Flasche.

ZWECKBESTIMMUNG

Dieses Nasenspray dient der langanhaltenden Befeuchtung und verbesserten Reinigung der Nasenschleimhaut.

GEEIGNET FÜR

hysan® Hyaluronspray kann von Erwachsenen und Kindern ohne Altersbeschränkung angewendet werden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kann hysan® Hyaluronspray bei Kindern, schwangeren und stillenden Frauen angewendet werden.

Bei der Verabreichung an einen Säugling oder ein Kleinkind sowie bei behinderten oder geriatrischen Patienten sollte die Anwendung durch die Eltern oder eine andere Betreuungsperson erfolgen, wie im Abschnitt ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE beschrieben.

NUTZEN, LEISTUNG UND WIRKUNGSWEISE

Trockene Umgebungsluft, Rauch, Staub, Wind, kalte Luft sowie eine Erkältung können dazu führen, dass die Nasenschleimhaut ihre natürliche Feuchtigkeit verliert, d.h. „ausgetrocknet“. Der Feuchtigkeitsmangel beeinträchtigt die natürliche Reinigung der Nasenschleimhaut und Betroffene klagen oft über das unangenehme Gefühl einer „trockenen Nase“.


In solchen Fällen hilft die Anwendung von hysan® Hyaluronspray, die Nasenschleimhaut wieder zu befeuchten und die Reinigungsfunktion der Nase zu unterstützen. Damit wird eine ungehinderte Atmung erleichtert.

hysan® Hyaluronspray enthält das Natriumsalz der Hyaluronsäure, eine physiologische Substanz, die auch in anderen Körperteilen vorkommt. Natriumhyaluronat hat die einzigartige physikalische Eigenschaft, einen gleichmäßigen und stabilen Feuchtigkeitsfilm zu bilden, der gut auf der Nasenschleimhaut haftet. Dadurch ist der Befeuchtungseffekt besonders langanhaltend.

hysan® Hyaluronspray enthält kein Konservierungsmittel und kein Treibgas. Da Hyaluronsäure eine natürliche, körpereigene Substanz ist, wird jedes Allergierisiko vermieden.

ALLGEMEINE ANWENDUNGSHINWEISE

Verwenden Sie hysan® Hyaluronspray nur, wenn die Versiegelung der Faltschachtel vor der ersten Anwendung unversehrt war (☞).

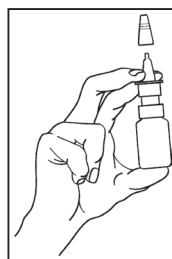

Vor Gebrauch die Kappe abnehmen. Pumpe bis zum Austritt der Lösung betätigen (in der Regel 1-2mal). Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig. Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und einmal pumpen, dabei leicht einatmen. Je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen.

Wichtig aus hygienischen Gründen:

Aus hygienischen Gründen bitte den Nasenadapter nach jeder Anwendung abwischen und mit der Schutzkappe verschließen. Zur Vermeidung von Infektionsübertragungen sollte jede Flasche hysan® Hyaluronspray nur von derselben Person benutzt werden (☞).

Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn Sie Fragen zur korrekten Anwendung dieses Medizinprodukts haben.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Wenn Sie sich nicht besser fühlen oder wenn Sie sich nach mehrtägiger Anwendung schlechter fühlen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Es sind keine Wechselwirkungen mit der Anwendung von hysan® Hyaluronspray bekannt. Wenn Sie andere Nasensprays oder Nasentropfen anwenden, sollte zwischen den Anwendungen ein Abstand von mindestens 30 Minuten liegen.

hysan® Hyaluronspray sollte immer zuletzt angewendet werden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob und wie Sie mehrere Nasenpräparate kombinieren sollen.

Es sind keine Risiken im Zusammenhang mit einer Überdosierung von hysan® Hyaluronspray bekannt.

NEBENWIRKUNGEN

Da hysan® Hyaluronspray keine Konservierungsmittel enthält, ist das Produkt auch bei lang dauernder Anwendung im Allgemeinen sehr gut verträglich. Sie können es deshalb bedenkenlos auch über einen längeren Zeitraum benutzen.



Wenn während der Anwendung von hysan® Hyaluronspray unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, sollte die Anwendung des Nasensprays abgebrochen werden.

Falls während der Verwendung dieses Medizinprodukts oder als Folge seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller () und Ihrer nationalen Behörde.

DOSIERUNG

hysan® Hyaluronspray sollte entsprechend Ihrem Zustand und den Anweisungen Ihres Arztes oder Ihres Apothekers angewendet werden. Üblicherweise werden dreimal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße hysan® Hyaluronspray in jedes Nasenloch verabreicht. Wenn erforderlich kann es aber auch öfter angewendet werden. Es bestehen keine Beschränkungen in der Anwendungsdauer. hysan® Hyaluronspray ist für eine Daueranwendung geeignet. Allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Arzt um Rat fragen.

GEGENANZEIGEN

hysan® Hyaluronspray sollte nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen einen der Inhaltsstoffe sind

LAGERUNG

Nicht über 25 °C lagern ( 25 °C).

Verwenden Sie hysan® Hyaluronspray nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums ()

hysan® Hyaluronspray kann nach dem ersten Anbruch 6 Monate verwendet werden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

 Entsorgen Sie dieses Medizinprodukt über den Hausmüll entsprechend Ihrer nationalen Gesetzgebung. Diese Maßnahme trägt zum Schutz der Umwelt bei.

VERFÜGBARE PACKUNGSGRÖSSEN

10 ml Nasenspray (unverk. Muster)

20 ml Nasenspray

STAND DER INFORMATION:

November 2024

 **URSAPHARM Arzneimittel GmbH,**
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken
Deutschland

 **Deutschland:**
URSAPHARM Arzneimittel GmbH,
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken,
Tel.: +49 6805/9292-0, Fax: +49 6805/9292-88,
E-Mail: info@ursapharm.de, www.ursapharm.de

 **Österreich:**
URSAPHARM Ges.m.b.H.,
Inkustraße 1-7, 3400 Klosterneuburg,
Tel.: +43 2243/26006, Fax: +43 125 330 339 113
E-Mail: office@ursapharm.at

CE₀₁₉₇

MD

STERILE A

Symbol:	Erklärung:
	Hersteller
	Vertrieb
MD	Medizinprodukt
CE	CE-Kennzeichnung
UDI	Eindeutige Produktkennung
STERILE A	Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und Gebrauchsanweisung beachten
LOT	Chargennummer
	Herstellungsdatum [JJJJ-MM]
	Haltbarkeitsdatum [JJJJ-MM]
	Gebrauchsanweisung befolgen
 25 °C	Nicht über 25 °C lagern.
	Einzelner Patient – mehrfach verwendbar

Weitere Informationen zu hysan® Hyaluronspray

Liebe Anwenderin, lieber Anwender!

Die Beeinträchtigung der Nasenatmung ist ein häufig auftretendes Problem.

Das in hysan® Hyaluronspray enthaltene Natriumhyaluronat ist ein natürlicher Stoff mit besonders positiven Eigenschaften. hysan® Hyaluronspray bildet einen angenehmen und lang haftenden Schutzfilm auf der Oberfläche der Schleimhaut, der nicht so rasch abgespült werden kann.

hysan® Hyaluronspray bietet gegenüber den herkömmlichen Salzwassersprays den Vorteil, dass man es nicht so häufig anwenden muss, um eine hohe und gleichmäßige Befeuchtung der empfindlichen Nasenschleimhaut zu erzielen.

hysan® Hyaluronspray befeuchtet, pflegt und unterstützt die Selbstreinigung der Nase. Aufgrund der besonderen Ventilttechnik des Systems enthält hysan® Hyaluronspray keine Konservierungsmittel, die oft allergische Reaktionen auslösen und die empfindliche Nasenschleimhaut reizen können. Der Spraymechanismus des Dosiersystems funktioniert rein mechanisch. Das Präparat enthält kein Treibgas.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!
Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. +49 6805/92 92 222) oder via <https://ursapharm.de/produktfeedback/> von Ihnen zu hören.