

Ulotka informacyjna

Proszę zapoznać się dokładnie z poniższymi informacjami, umożliwi to właściwe stosowanie HYLO DUAL INTENSE®.

HYLO DUAL INTENSE®

Hialuronian sodu i ektoina

Do intensywnego, leczniczego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzowego.

Stabilny film łzowy powoduje zmniejszenie objawów zapalnych i alergicznych takich jak swędzenie i pieczenie oczu.

Sterylny roztwór bez fosforanów i konserwantów.

Czym jest HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® jest sterylnym roztworem kropli ocznych bez środków konserwujących.

Skład:

1 ml HYLO DUAL INTENSE® zawiera 2 mg hialuronianu sodu, 20 mg ektoiny, kwas borowy, boraks i wodę do iniekcji.

Do czego potrzebny jest HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® służy do intensywnego, leczniczego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzowego. Powoduje to uwolnienie od objawów zapalnych takich jak swędzenie i pieczenie oczu.

Kiedy powinno się stosować HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® jest przeznaczony do leczenia choroby zespołu suchego oka.

W tych sytuacjach podwójne działanie zawartego w HYLO DUAL INTENSE® hialuronianu sodu i ektoiny niesie ze sobą szczególne korzyści.

HYLO DUAL INTENSE® składa się z soli sodowej kwasu hialuronowego, naturalnej substancji występującej w wielu organach ciała ludzkiego, w tym także w oku. Posiada ona szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego, stabilnego filmu łzowego, który długo utrzymuje się na powierzchni oczu i jest odporny na wypłukiwanie. Ta tak zwana właściwość bioadhezyjna zapewnia ochronę rogówki i spojówki, a wraz z fizjologicznymi łzami pokrywa powierzchnię oka. HYLO DUAL INTENSE® zawiera większą ilość hialuronianu sodu, dzięki czemu jest bardziej lepki, a dzięki temu oko ma intensywną, kojącą i długotrwałą warstwę nawilżającą. Przewlekłe lub bardziej nasilone objawy ustępują, a oko jest chronione przed dalszym podrażnieniem.


Ektoina jest naturalną substancją uzyskaną z drobnoustrojów żyjących w ekstremalnych warunkach (np. w słonych jeziorach). Mikroorganizmy te aby przetrwać w tych niesprzyjających warunkach wytwarzają naturalną substancję zwaną ektoiną. Szczególne właściwości tej substancji zostały wykorzystane w preparacie HYLO DUAL INTENSE®. Ektoina zwiększa zdolność wiązania wody przez struktury powierzchniowe oka, tworząc na powierzchni spojówek fizjologiczną barierę. Jednocześnie stabilizuje ona rozpuszczalną w tłuszczach warstwę filmu łzowego, która zapobiega nadmiernemu wyparowywaniu łez.

Interakcja hialuronianu sodu i ektoiny zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie oczu chroniąc je jednocześnie przed nadmiernym, szczególnie szkodliwym dla nich wyparowywaniem łez.

Typowe objawy, swędzenie i pieczenie, występujące jako reakcje zapalne na podrażnienia wywołane przez środowisko, są łagodzone przez HYLO DUAL INTENSE®.


Jak stosować HYLO DUAL INTENSE®?

Krople HYLO DUAL INTENSE® można stosować tylko wówczas, jeżeli przed pierwszym użyciem nie stwierdzi się uszkodzenia zabezpieczenia opakowania (☹).

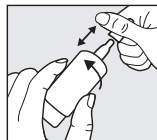


Rys. 1

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. W tym celu proszę chwycić nakładkę tuż ponad butelką. Drugą ręką wysunąć ruchem obrotowym butelkę z nakładki. Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i zdecydowanie nacisnąć kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

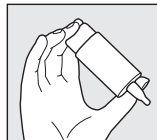

Rys. 2

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskaźniczy i środkowy ułożyć na jej denku.

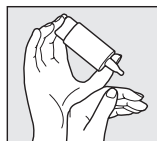


Rys. 3

Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę HYLO DUAL INTENSE® na drugiej ręce.



Rys. 4

Podczas stosowania kropli do oczu należy unikać kontaktu końcówki zakraplacza z powierzchnią oka i skóry. Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania **jednej** kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkości kropli i szybkości jej podawania będzie każdorazowo taka sama, **niezależnie od siły nacisku na denko**. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powiekę, umożliwiając równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu.

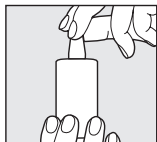

Rys. 5

Po każdorazowym użyciu butelkę należy starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowego użytkowania tego wyrobu medycznego prosimy o kontakt z producentem.

Butelka zawierająca 10 ml roztworu odpowiada około 300 kroplom. Ze względów technicznych, po zużyciu całych 10 ml roztworu, pozostaje na dnie butelki niewielka jego ilość, ponad gwarantowaną objętość.

HYLO DUAL INTENSE® jest odpowiedni do długotrwałego leczenia i może być stosowany przez dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Należy przestrzegać zasady, że jednego opakowania preparatu używa zawsze ta sama osoba (👤).

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując HYLO DUAL INTENSE®

Jeśli po kilku dniach stosowania nie czujesz się lepiej lub czujesz się gorzej, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli używasz innych kropli do oczu, między aplikacjami powinno być co najmniej 30 minut, a HYLO DUAL INTENSE® powinien być zawsze stosowany na końcu. Maści do oczu nie powinny być podawane razem z leczeniem HYLO DUAL INTENSE®.

Z uwagi na fakt, że HYLO DUAL INTENSE® nie zawiera środków konserwujących jest zwykle dobrze tolerowany nawet przy długotrwałym stosowaniu. W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano działania niepożądane, takie jak nadwrażliwość, pieczenie, nadmierne łzawienie, ból, uczucie ciała obcego lub inne przejściowe podrażnienia miejscowe, które ustępują po zaprzestaniu stosowania HYLO DUAL INTENSE®.

Należy pamiętać, że po zastosowaniu HYLO DUAL INTENSE® możliwe jest tymczasowe niewyraźne widzenie ze względu na lepkość roztworu. W bardzo rzadkich przypadkach może to spowodować przejściowy ból głowy u wrażliwych pacjentów. Ze względu na wysoką lepkość roztworu HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Nie ma kontrolowanych danych klinicznych na temat stosowania HYLO DUAL INTENSE® u dzieci, w czasie ciąży i laktacji. Zgodnie z istniejącą wiedzą HYLO DUAL INTENSE® może być stosowany u dzieci w wieku powyżej 6 lat, w czasie ciąży i laktacji.

W przypadku, gdy podczas stosowania tego wyrobu medycznego lub w wyniku jego użytkowania doszło do poważnego incydentu medycznego, należy zgłosić go wytwórcy (🏭).

Jak często i jak długo powinno stosować się HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® zwykle podaje się dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. W przypadku częstszego stosowania HYLO DUAL INTENSE® (np. częściej niż 10 razy dziennie) lub przy silniejszych dolegliwościach należy poddawać się regularnym badaniom przez lekarza okulistę.

Podczas ciąży i laktacji, a także u dzieci w wieku poniżej 12 lat, HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany częściej niż 10 razy dziennie.

HYLO DUAL INTENSE® nadaje się do długotrwałego leczenia. Jednak – podobnie jak w przypadku wszystkich utrzymujących się objawów - należy skonsultować się z okulistą, jeśli twoje dolegliwości nie ustępują w przeciągu dwóch tygodni.

Kiedy nie należy stosować HYLO DUAL INTENSE®?

HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany w przypadkach występowania nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu i u dzieci poniżej 6 roku życia.

HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Na jakie wskazówki dotyczące przechowywania HYLO DUAL INTENSE® należy zwrócić uwagę?

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C (🌡️ 25°C). HYLO DUAL INTENSE® może być używany przez okres 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Nie należy używać po upływie daty ważności (🕒).

Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zużyte opakowanie należy wyrzucić do śmieci zgodnie z prawem obowiązującym w Twoim kraju. To pomoże chronić środowisko.

Dostępne opakowanie:

10 ml krople do oczu

5 ml krople do oczu – próbka, nie do sprzedaży

Stan informacji: czerwiec 2022

🏭 URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Niemcy

🇵🇱 URSAPHARM Poland sp. z o.o.
ul. Malarska 6, 05-092 Łomianki

Tel: 22 732 07 90, Faks: 22 732 07 99

E-mail: info@ursapharm.pl, www.hylo.pl



Symbol:	Objaśnienie:
	Producent
	Dystrybutor
	Wyrób medyczny
	Znak CE
	Sterylizowane przy użyciu technik aseptycznych
	Nie należy używać, jeśli opakowanie zewnętrzne jest uszkodzone.
	Numer serii
	Data ważności [RRRR-MM]
	Przeczytaj instrukcję użytkowania
	Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
	Jedno opakowanie powinien używać jeden pacjent